


كيفية الحصول على العينة الخاصة بك


قم بتطهير يديك.

1

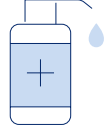

افتح غلاف عود تنظيف الأذن
وتجنب لمس الطرف القطني.

2

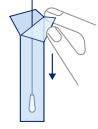

قم بلف طرف عود تنظيف الأذن
ثلاث مرات في كلتا فتحتي الأنف.

3




ضع عود تنظيف الأذن في الأنبوب،
مع جعل الطرف القطني لأسفل.

4



قم بتطهير يديك مرة أخرى.
بذلك تكون قد انتهيت!

5

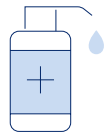

كيفية تنشيط مجموعة تحليل كوفيد-19

1

قم بتنشيط المجموعة الخاصة بك (أو الخاصة بالشخص التابع لك) عبر الإنترنت على color.com/covid/ **.activate**

سوف تحتاج إلى الرمز الشريطي الفريد الخاص بك، والذي يمكنك إيجاده على أنبوب جمع العينة.



! تحذير: لن يتم تحليل العينة الخاصة بك إذا لم يتم تنشيط المجموعة.

2

لتنشيط مجموعتك، سيكون عليك إنشاء حساب .Color

1. انقر فوق + إضافة شخص تابع.
2. أدخل معلومات الشخص التابع.
3. أدخل رقم معرف الطالب للشخص التابع. إذا لم تكن تعرف معرف الطالب الخاص به، فاسأل فريق مكتب الاستقبال بمدرستك.
4. تضمن هذه الخطوة ربط حسابك بالبرنامج الصحيح.

بالنسبة للطلاب دون سن 14 عامًا، سيكون على آبائهم أو أولياء أمورهم تنشيط حساب باستخدام اسم الوالد/ولي الأمر وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به، بالإضافة إلى معرف الطالب للشخص التابع من أجل تنشيط المجموعة الخاصة به.

بالنسبة للطلاب في سن 14 عامًا أو فوق هذا السن، يجب إنشاء حساب باستخدام اسم الطالب وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به، بالإضافة إلى معرف الطالب الخاص به من أجل تنشيط مجموعته.

بالنسبة للموظفين، يجب إنشاء حساب باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بمدرستهم.