


如何採集樣本



1 清潔消毒手部。

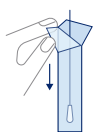

2 打開拭子包裝，避免碰觸棉花頭。



3 在兩側鼻腔內轉動拭子尖端三次。



4 將拭子棉花頭向下放進採檢管。



5 再次清潔消毒手部，大功告成！

如何啟用 COVID-19 檢測套組

1

請在 color.com/covid/activate 線上啟用您的 (或您的受撫養眷屬的) 試劑組。

您會需要位於採檢管上的專屬條碼。



! 警告: 若未啟用該套組, 則不會檢測您的樣本。

2

需建立 Color 帳戶才能啟用套組。

1. 按一下「新增受撫養眷屬」。
2. 輸入受撫養眷屬的資訊。
3. 輸入受撫養眷屬的學生證編號。如果您不確定受撫養眷屬的學生證編號, 請向學校的相關職員詢問。
4. 此步驟可確保將您的帳戶連結至正確的計畫。

若為未滿 14 歲的學生, 需由父母或監護人使用父母/監護人的姓名和電子郵件地址啟用帳戶, 並以受撫養眷屬的學生證編號啟用套組。

若為已滿 14 歲的學生, 請以學生姓名和電子郵件地址建立帳戶, 並以學生證編號啟用套組。

若為員工, 請以學校分配的電子郵件地址建立帳戶。