



# Cómo tomar la muestra

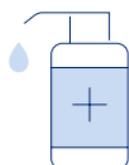

**1** Desinfecte sus manos.

---

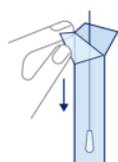

**2** Abra el paquete del hisopo evitando tocar la punta de algodón.

---



**3** Gire la punta del hisopo tres veces en ambas fosas nasales.

---



**4** Coloque el hisopo en el tubo con la punta de algodón hacia abajo.

---



**5** Vuelva a desinfectar sus manos. ¡Listo!

# Cómo activar un kit para la prueba de COVID-19

1

Active su kit (o el de su dependiente) en línea en [color.com/covid/activate](https://color.com/covid/activate)

Necesitará su código de barras único que puede encontrar en su tubo de recolección.



**!** **ADVERTENCIA:** No se analizará su muestra si el kit no está activado.

2

Para activar su kit, debe crear una cuenta de Color.

1. Haga clic en + Agregar dependiente.
2. Ingrese la información del dependiente.
3. Ingrese el número de identificación (ID) de estudiante del dependiente. Si no conoce la ID del estudiante, pregúntele al equipo de la oficina principal de su escuela.
4. Este paso garantiza que conectemos su cuenta con el programa correcto.

Para los estudiantes menores de 14 años, los padres o tutores deberán activar una cuenta usando el nombre y la dirección de correo electrónico del padre o tutor, con la ID del estudiante dependiente para activar el kit.

Para los estudiantes de 14 años o más, se debe crear una cuenta con su nombre y dirección de correo electrónico junto con la ID de estudiante para activar el kit.

Para el personal, se debe crear una cuenta con la dirección de correo electrónico designada por su escuela.