



# Paano kumuha ng iyong sample

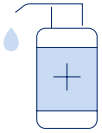

**1** I-sanitize ang iyong mga kamay.

---

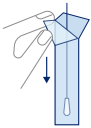

**2** Buksan ang swab package. Iwasang mahawakan ang cotton tip!

---




**3** Tatlong beses na ikutin ang dulo ng swab sa magkabilang butas ng ilong.

---



**4** Ilagay ang swab sa tube, na nasa ibaba ang cotton tip.

---

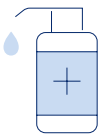

**5** I-sanitize ulit ang iyong mga kamay. Tapos na!

# Paano mag-activate ng COVID-19 test kit

1

I-activate online ang kit mo (o kit ng iyong dependent) sa [color.com/covid/activate](https://color.com/covid/activate).

Kakailanganin mo ang natatangi mong barcode, na makikita mo sa iyong collection tube.



**!** **BABALA:** Hindi susuriin ang iyong sample kung hindi na-activate ang kit.

2

**Para ma-activate ang iyong kit kakailanganin mong gumawa ng Color account.**

1. I-click + Magdagdag ng Dependent.
2. Ilagay ang impormasyon ng dependent.
3. Ilagay ang numero ng student ID ng dependent. Kung hindi mo alam ang kaniyang student ID, itanong sa front office team ng inyong paaralan.
4. Tinitiyak ng hakbang na ito na ikinokonekta namin ang iyong account sa tamang program.

Para sa mga Mag-aaral <14 na taong gulang, kakailanganing mag-activate ng account ang magulang o tagapag-alaga gamit ang pangalan at email address ng magulang/tagapag-alaga, kasama ang Student ID ng dependent para ma-activate ang kanyang kit.

Para sa mga Mag-aaral  $\geq 14$  na taong gulang, dapat gumawa ng account gamit ang kanyang pangalan at email address, kasama ang kanyang Student ID para ma-activate ang kanyang kit.

Para sa Kawani, dapat gumawa ng account gamit ang kanyang email address na itinalaga ng paaralan.